

Liebe Kundin, lieber Kunde,

hiermit beglückwünschen wir Sie zum Erwerb des neuen Weinberger – Badewannensitzes. Er sorgt für mehr Sicherheit und Komfort in Ihrer Badewanne und lässt sich schnell und einfach einsetzen.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf.
- Verwenden Sie den Badewannensitz nur zum Sitzen und steigen Sie niemals auf den Sitz oder benutzen ihn als Leiter. Es besteht Absturzgefahr. Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit von 150 kg.
- In dieser Gebrauchsanleitung finden Sie Informationen und Hinweise darüber, wie Sie den Badewannensitz sicher und sachgemäß benutzen können.
- Der Badewannensitz ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nur zum Baden bestimmt. Jede weitere Verwendung ist nicht erlaubt.

weinberger®

Badewannensitz



Technische Daten:



Sitzbreite: 420 mm

Sitztiefe: 340 mm

Gewicht: 1,65 kg

Max. Belastbarkeit: 150 kg

Badewannensitz Nr. 43909

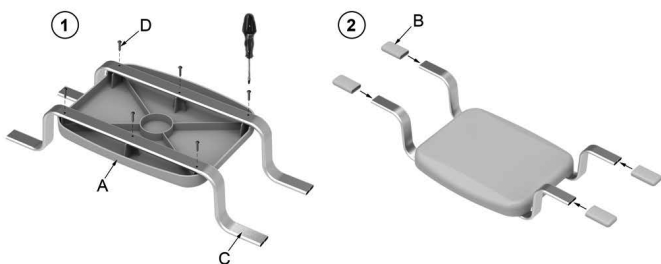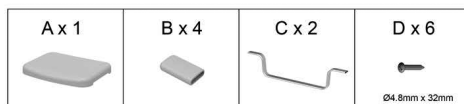

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

1 Montageanleitung

1 Sitz

2 Aluminium - Bügel

4 Endstopfen

6 Schrauben

Bitte verwenden Sie die beiliegenden Befestigungselemente

Pflegeanleitung:

Halten Sie den Badewannensitz sauber und reinigen ihn nach jeder Benutzung mit einem feuchten Tuch und eventuell mit einem neutralen, aber keinem scharfen Reiniger. Trocknen Sie ihn mit einem entsprechenden Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Dusch- Öl oder sonstigen Rückstände verbleiben. Bei Verschmutzungen mit infektiösem Material kann der Sitz mit den üblichen Flächendesinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Nach der Produktlebenszeit führen Sie die einzelnen Teile entsprechend der Materialkennung Ihrer örtlichen Entsorgung zu.

Weinberger GmbH & Co. KG
Bergische Str. 11
D – 42781 Haan

Modellnummer KV 23
Art.-Nr. 43909
L.-Nr. 3214